

24

SET TO RESCUE



Installation Manual



Parts-list

This Rotaid package contains:

- Installation manual
- Rotaid 24/7 voucher
- User Guide
- Drilling template
- Polycarbonate backplate
- Polycarbonate cover
- Rotaid 24/7 module
- Transformer unit and power cord
- Fastening materials

Screw Set:



4x Tapping screw



4x Plug




2x Eject screw



1x Bolt




1x Nut

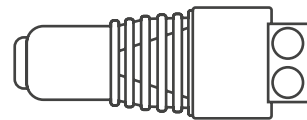

1x Connector

Drilling Template:

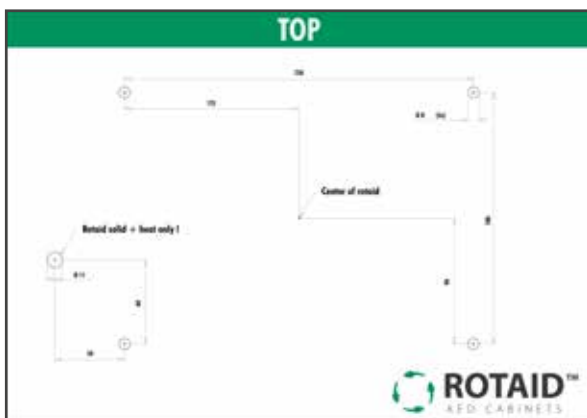

1x Sleeve



ADVARSEL!



Kun et certificeret firma eller elektriker skal installere skabet, da en del af installationen leveres med en elektrisk installation. Dit skab er endnu ikke klar til brug!



Bestem det sted, hvor du ønsker at montere Rotaid. Sørg for, at der ikke er nogen uregelmæssigheder på det ønskede sted.



For at sikre, at defibrillatoren forbliver inden for sit operationelle temperaturområde i hele året, skal Rotaid altid være placeret i skyggen.



Vær opmærksom på brandsikkerhed og eventuelle evakueringsregler.

Trin 1. Forberedelser og boring



Den ideelle monteringsstilling for Rotaid er 150 centimeter, målt fra midten af skabet til gulvet.

Brug boreskabelonen til at markere de fire huller til monteringspositionerne. Marker også hullet til kablet til skabet.




Bor de fire huller ved hjælp af en 8 mm bor og brug en 10 mm bor til boring af kabelhullet.

Placer nu de fire plastikvægstik.

Trin 2. Kabelfoder og tilbehør

Find hjælp fra en anden person til at hjælpe dig med dette trin.

Nederst til venstre på bagpladen findes et gummiprop. Brug en vinkel eller skruetrækker til at punktere dette prop for at give plads nok til strømkablet.

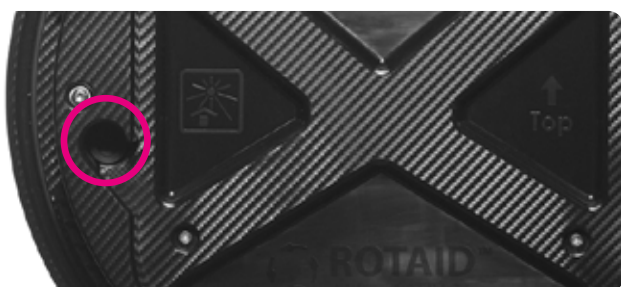

Kør hele strømkablet gennem hullet og væggen.

Vigtig! Fastgør ikke det hvide Rotaid 24/7-modul endnu på bagpladen.

Sæt nu bagpladen fast på væggen ved hjælp af de fire skruer.



Herefter kan du montere 24/7-modulet via de to små skruer. Brug de to huller øverst på modulet (se billede).



Trin 3. Placering af dækning og defibrillator

Sæt nylonremmen på dækslet ved hjælp af den lille bolt og møtrik.



Efter montering af dækslet kan du placere defibrillatoren på platformen. Brug det elastiske bånd til at fastgøre defibrillatoren.



Du kan nu dreje dækslet på bagpladen. Justér udsparringen på oversiden af dækslet med den specielle markør øverst til venstre på bagpladen. Sørg for, at stålkrogen i bunden er i dækslet, inden du begynder at dreje. Drej dækslet til højre, indtil det ikke kan bevæge sig længere mod højre. Stålkroen falder nu gennem åbningen i bunden af hættten. Dit Rotaid er monteret korrekt.

Fortsæt nu med trin 4.



Trin 4. Elektrisk kabling

VIGTIG!

Placer altid transformatorenheden inde, da den ikke er egnet til udendørs brug.

Placer aldrig transformatorenheden i Rotaid-kabinetet!


Kabel brun

+

Kabel blå

-



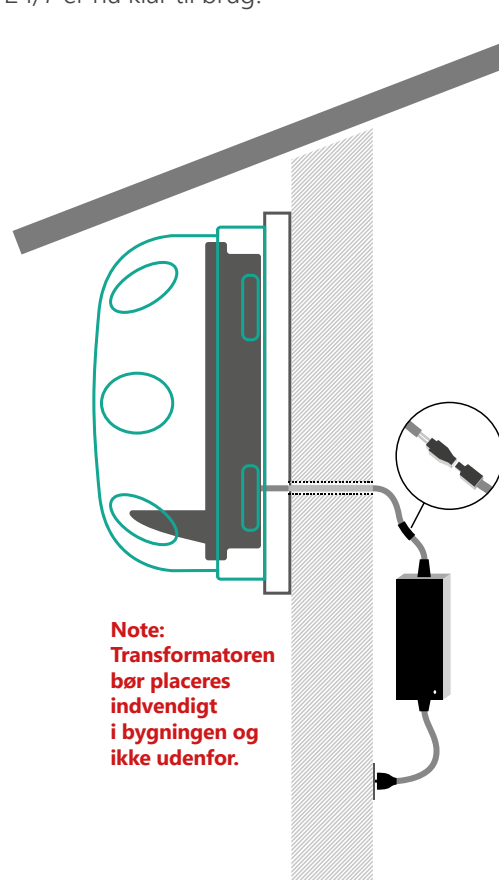

1. Klip kablet til den ønskede længde og strip det ydre kabel (ca. 2 cm)
2. Fjern 5 mm af isoleringen af begge kabler
3. Placer isoleringsisoleringens isolatoren over kablet.
4. Slut begge ledninger til stikket
5. Placer crimp-muffen over stikket og brug en varmepistol til at fastgøre. Du kan også isolere / fikse stikket med tape.
6. Tilslut stikket til stikket på transformeren (han - hun)
7. Tilslut nu stikket til transformeren, og sæt strømkablet ind i stikkontakten.
8. LED-belysningen i skabet er nu aktiveret og tændes konstant. Dette indikerer, at din installation er blevet succesrig.
9. Din Rotaid 24/7 er nu klar til brug!



Trin 5. Aktiver dit Rotaid 24/7 system

Følg instruktionerne på Rotaid 24/7-kuponen for at aktivere dit Rotaid 24/7-system.



 rotaid247.com  support@rotaid247.com  +31 (0)478 769 052
 Keizersveld 52D 5803 AN, Venray The Netherlands